Denka



2021年11月15日

各位

会 社 名 デ ン カ 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 今井 俊夫 (コード 4061: 東証第1部)

コーポレートコミュニケーション部長問 合 せ 先

福岡 智

(電話 03-5290-5511)

新型コロナウイルス抗原迅速診断キット 一部ロットの自主回収のお知らせ(第二報)

デンカ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:今井 俊夫、以下「当社」)は、新型コロナウイルス抗原迅速診断キット「クイックナビ™-COVID19 Ag」につき、11月8日のリリースに次いで、ご使用者の安全を第一に考え、回収の対象範囲を拡大して自主回収(クラスⅡ*)することと致しましたのでお知らせします。

「11月8日に続く自主回収の決定により、本製品をご使用いただいている皆様に多大なるご心配とご 迷惑をお掛けすることを深くお詫び申し上げます。このような事態を招いたことを猛省し、再発防止に 向けて万全を期すべく、社長として陣頭指揮にあたる所存です。」(デンカ株式会社 代表取締役社長 今井 俊夫)

なお、本件による2021年度当社連結業績への影響は精査中です。

*クラス II とは、その製品の使用等が、一時的な若しくは医学的に治癒可能な健康被害の原因となる可能性があるか又は重篤な健康被害のおそれはまず考えられない状況をいう。

記

1. 回収の概要と理由

本製品につきまして、一部の使用部材の不良により前回回収の対象とした 15 分で判定するロットの回収を判断して以降、8 分で判定する製品についても加速試験等を行い調査しておりましたが、一部ロット製品に於いて偽陽性率が高まる兆候が見られました。

そのため、対象を以下の製造番号まで広げ自主回収を行います。ご使用者の安全を第一に考え、当該製品納入施設に対しましては情報提供を行うと共に適切な対応をお願いしております。

- 2. 回収する体外診断用医薬品の概要
- ① 販売名

クイックナビ™ -COVID19 Ag

(承認番号: 30200EZX00047000 2020年8月11日)

②用涂等

鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中の SARS-CoV-2 抗原の検出 (SARS-CoV-2 感染の診断の補助)

3. 回収の対象

製造番号 0861061 から 0921071、及び 0981071 から 1031071 が対象です。

総数: 91,700箱(917,000個)

(1) クイックナビ[™] -COVID19 Ag (商品番号:326119)

製造番号	出荷数量	出荷時期	
0891071	8,000 箱(80,000 個)	2021年	7月8日
0921071	7,550 箱(75,500 個)	2021年	7月14日
0981071	8,000 箱(80,000 個)	2021年	7月27日
0991071	8,000 箱(80,000 個)	2021年	7月28日
1011071	6,314 箱(63,140 個)	2021年	7月29日
1021071	4,000 箱(40,000 個)	2021年	8月2日

(2) クイックナビ[™] -COVID19 Ag (大塚製薬) (商品番号:326140)

製造番号	出荷数量	出荷時期	
0861061	6,800 箱(68,000 個)	2021年	7月5日
0871061	6,800 箱(68,000 個)	2021年	7月6日
0881071	6,800 箱(68,000 個)	2021年	7月7日
0901071	8,000 箱(80,000 個)	2021年	7月9日
0911071	8,000 箱(80,000 個)	2021年	7月12日
0981071	1,436 箱(14,360 個)	2021年	7月27日
1021071	4,000 箱(40,000 個)	2021年	8月2日
1031071	8,000箱(80,000個)	2021年	8月3日

※自主回収対象製品は新型コロナウイルス抗原の有無を約8分で判定する製品の一部製造ロットです。


(3) 当該製造番号および使用期限の記載場所(外箱に製造番号および使用期限が記載されています)








「大塚製薬販売品」 外箱写真

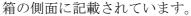



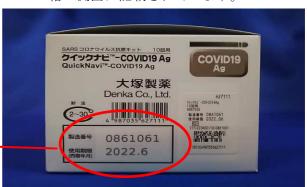

テストデバイス写真





4. 危惧される具体的な健康被害

回収対象の製品を使用した場合、上記のように判定結果において偽陽性の可能性があるため、安全性、有効性への影響が否定できません。

しかし、疾病の診断は他の検査結果や臨床症状を勘案し総合的になされますので、重篤な健康被害は 発生しないものと考えております。なお、現在までに当該事象に伴う健康被害の報告はございません。

5. 回収方法

回収方法については決定次第、該当施設へご連絡いたします。なお、医薬品卸を通じて購入されている施設につきましては、回収を行う旨を通知するとともに、速やかに自主回収を行います。

以上

【報道関係者からのお問い合わせ】

コーポレートコミュニケーション部 電話:03-5290-5511

【医療関係者からのお問い合わせ】

ライフイノベーション部門 ワクチン・診断薬事業本部 国内試薬部 電話:03-6214-3235